




Инструкция разложения комплекта для коленной артроскопии Matodrape

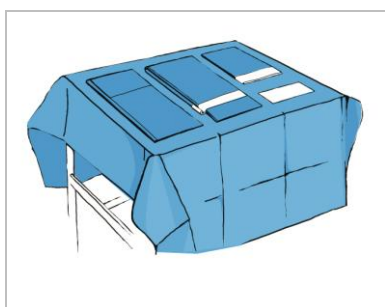

1. После вскрытия упаковки раскладываем комплект на инструментальном столе. Простыня на инструментальный стол, в которую завернут комплект выполняет функцию защиты инструментального стола, на ней следует разложить элементы комплекта. Обратите внимание на символы, всказывающие в каком направлении следует раскладывать простыни.




2. Простыню, в виде чехла с манжетом, натягиваем на столик Mayo.




3. Одеваем чехол на ногу пациента, под колено, закрепляя самоклеящимися лентами.



4. Разворачиваем простыню, которая сложена на половину. Простыня сложена таким образом, что отверстие с эластичным элементом видно сразу.

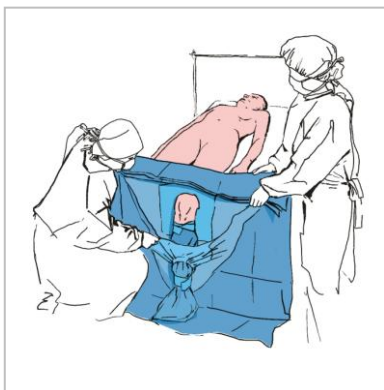

5. Продеваем нижнюю конечность сквозь отверстие с эластичным элементом в простыне (на высоте ляжки) и через отверстие с эластичным элементом в кармане для сбора жидкостей (на высоте голени).

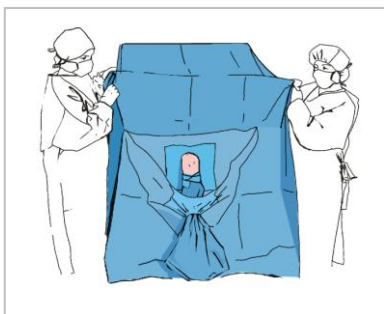

6. Раскладываем простыню на пациенте. Со стороны головы, крепим простыню к анестезиологическому экрану.