

На примере комплекта для окончания диализа MA-991-ZES2-818.

1



Перед проведением процедуры следует вымыть руки (специалист и пациент).

2



Вскрыть комплект для окончания диализа согласно инструкции - по направлению вскрытия.

3



Надеть пациенту одну перчатку.


Инструкция использования комплекта для окончания диализа Matoset

4




Специалист надевает обе перчатки.

5

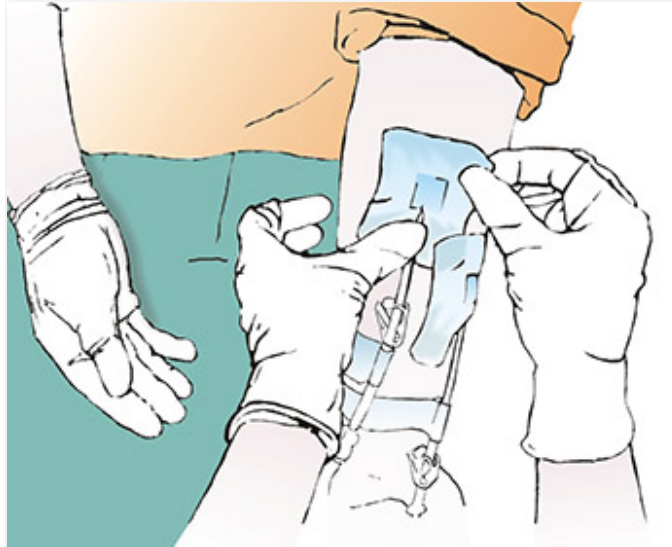


Одну за другой удалить канюли, пациент поддерживает салфетками место вкола канюли.

6

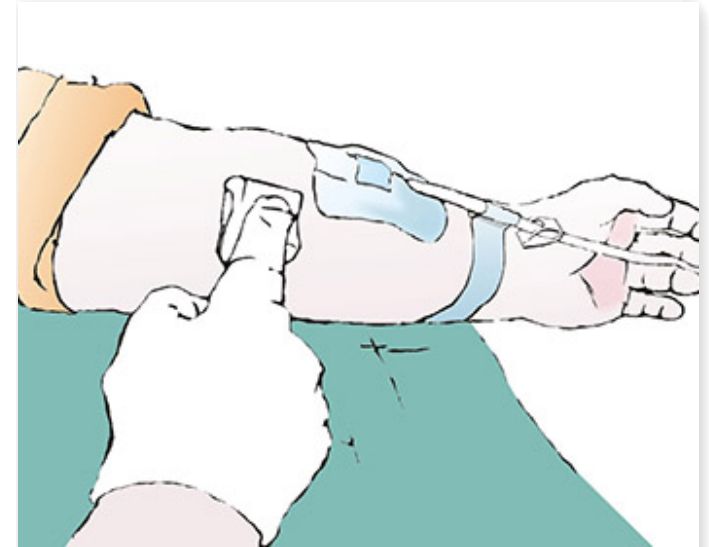

»

7

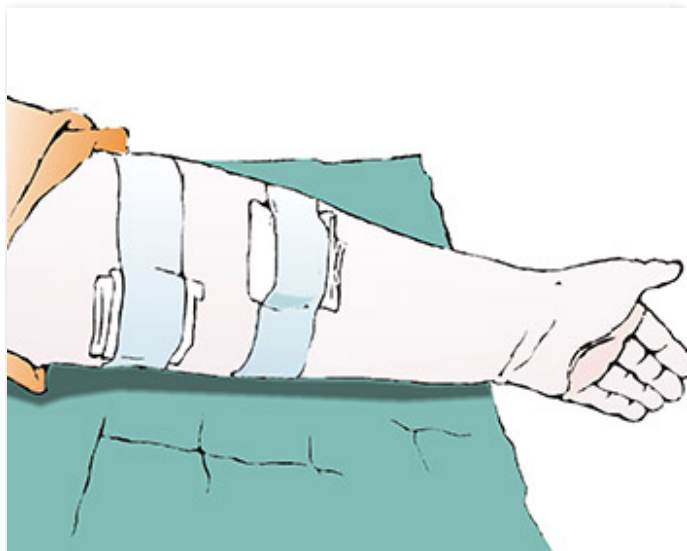

После удаления обеих канюль следует перевязать место вкола повязками салфетками из нетканого материала и пластырей.