



1

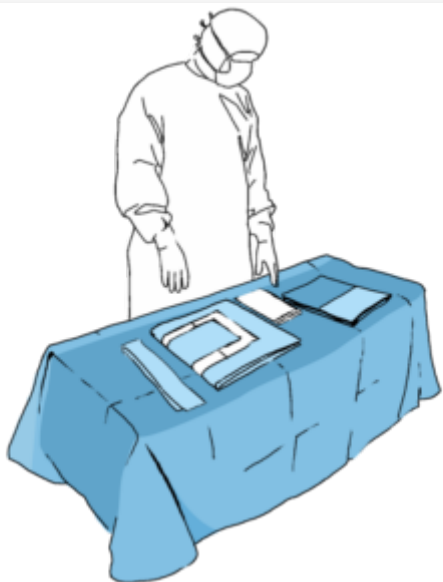

После вскрытия упаковки раскладываем комплект на инструментальном столе. Простынь на инструментальный стол, в которую завернут комплект, выполняет функцию защиты инструментального стола, на ней следует разложить элементы комплекта.

2

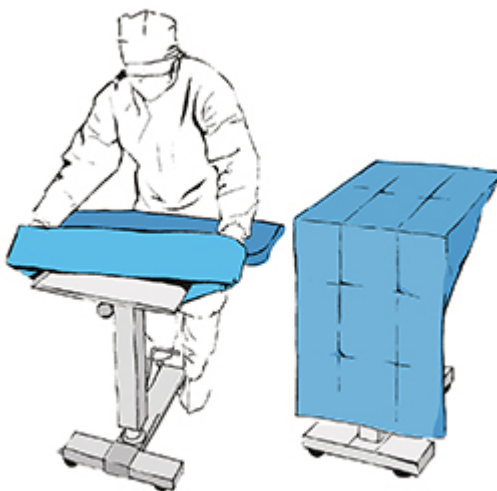

Простынь в виде чехла с манжетом натягиваем на столик Мейо.


3



Прежде чем разложить простынь на пациентке (разграничение операционного поля), следует обратить внимание на символы, указывающие направление раскладки.


Инструкция разложения комплекта для лапаротомии Matodrape

4

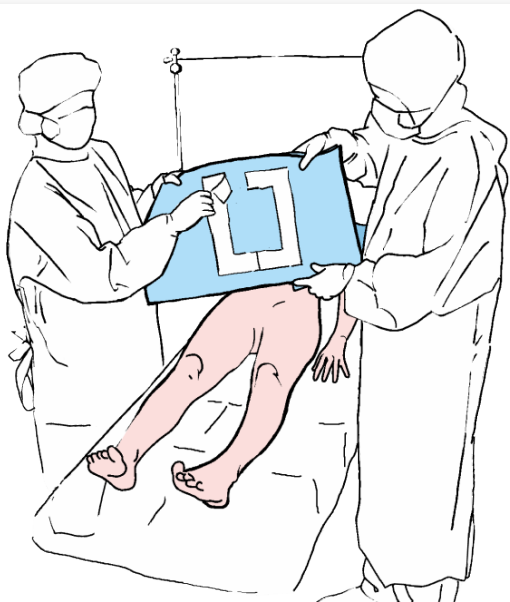


Удаляем защитную бумагу с главной простыни. Приклеиваем простынь таким образом, чтобы не было складок, обозначая одновременно верхнюю и боковые границы операционного поля. Следует нажать в области адгезивного края, чтобы крепко приклеить простынь к коже пациента.

5

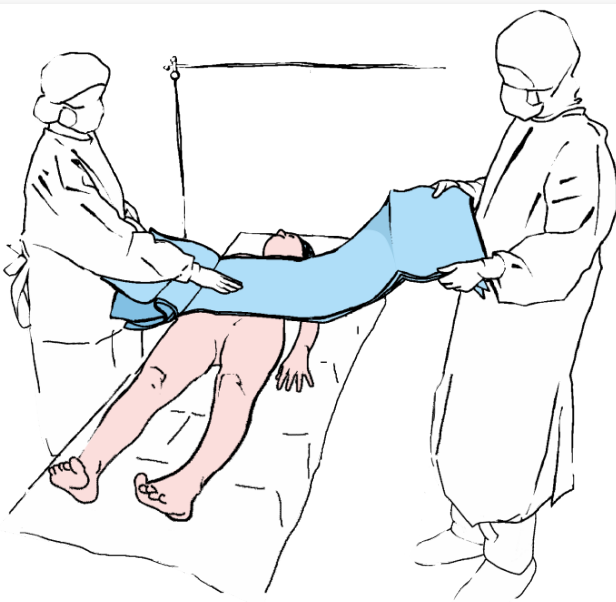


Разворачиваем бока простыни таким образом, чтобы они свободно свисали с операционного стола.

6

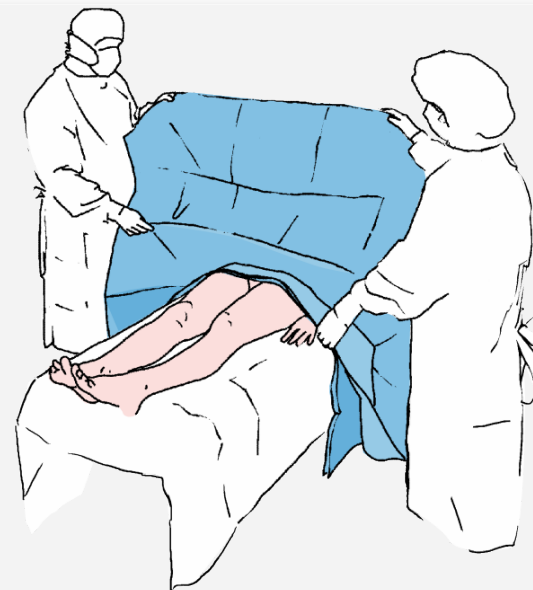

Верхнюю часть простыни - в направлении головы пациента (в направлении анестезиологического экрана) перекидываем через рамку, создавая таким образом анестезиологический экран.

7

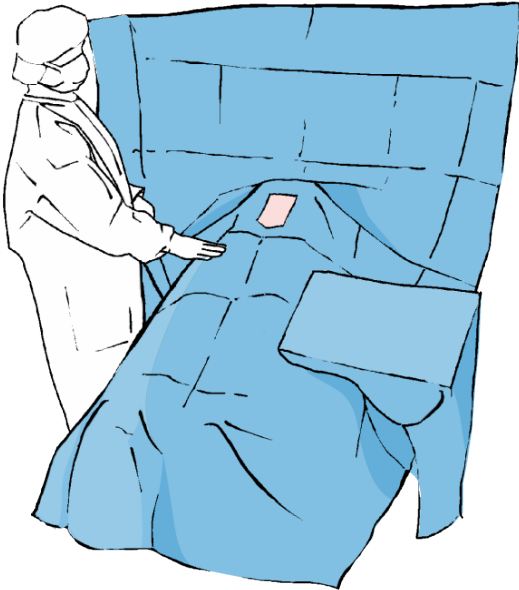

Разворачиваем нижнюю часть простыни в направлении нижнего конца операционного стола, закрывая таким образом нижние конечности пациента.