



1

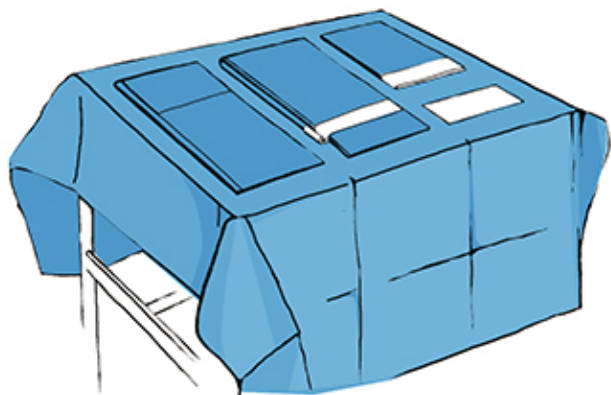

После вскрытия упаковки раскладываем комплект на инструментальном столе. Простыня на инструментальный стол, в которую завернут комплект, выполняет функцию защиты инструментального стола, на ней следует разложить элементы комплекта. Обратите внимание на символы, подсказывающие в каком направлении следует раскладывать простыни.

2

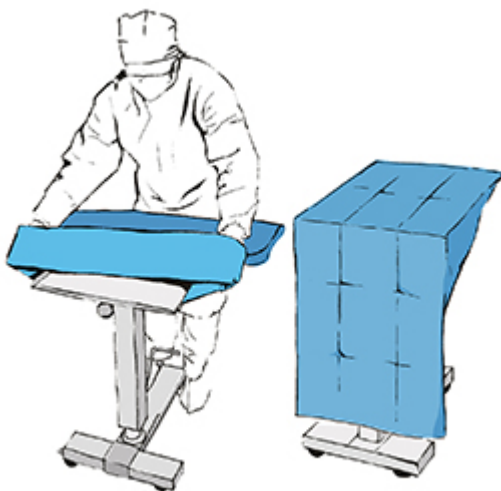

Простыню в виде чехла с манжетой натягиваем на столик Маю.


3



Одеваем чехол на ногу пациента, под колено, закрепляя самоклеящимися лентами.


# Инструкция разложения комплекта для коленной артроскопии Matodrape

4

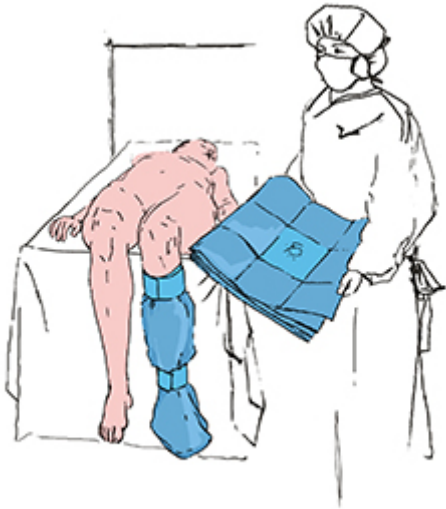


Разворачиваем простыню, которая сложена пополам. Простыня сложена таким образом, что отверстие с эластичным элементом видно сразу.

5

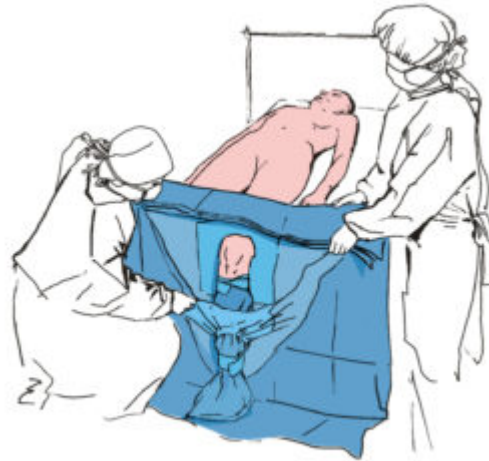

Продвигаем нижнюю конечность сквозь отверстие с эластичным элементом в простыне (на высоте ляжки) и через отверстие с эластичным элементом в кармане для сбора жидкостей (на высоте голени).

6

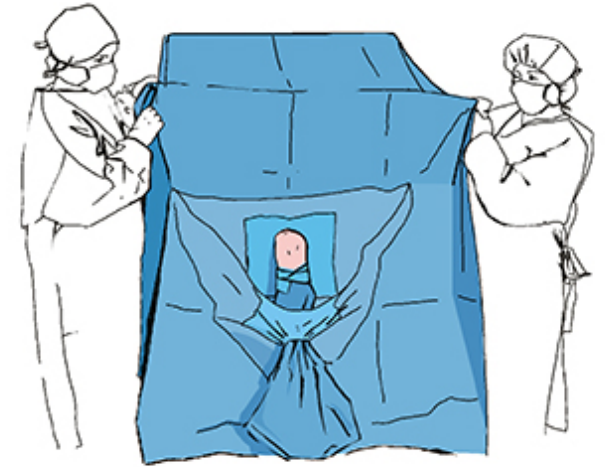

Раскладываем простыню на пациенте. Со стороны головы крепим простыню к анестезиологическому экрану.