



1

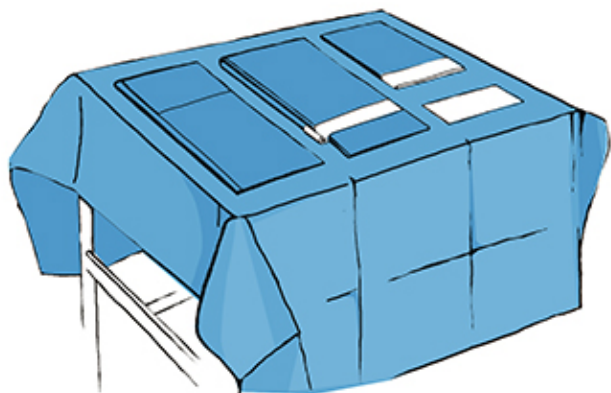

После вскрытия упаковки раскладываем комплект на инструментальном столе. Простыня на инструментальный стол, в которую завернут комплект, выполняет функцию защиты инструментального стола, на ней следует разложить элементы комплекта. Обратите внимание на символы, обозначающие направление раскладывания простыни.

2

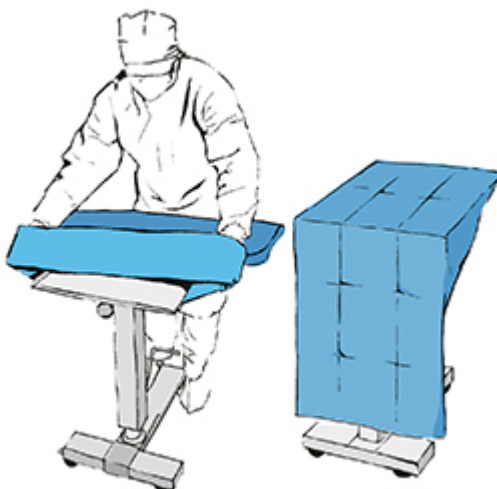

Простыню в виде чехла с манжетой натягиваем на столик Mayo.


3



Отклеиваем защитную ленту с нижней простыни.


# Инструкция разложения универсального комплекта Matodrape

4

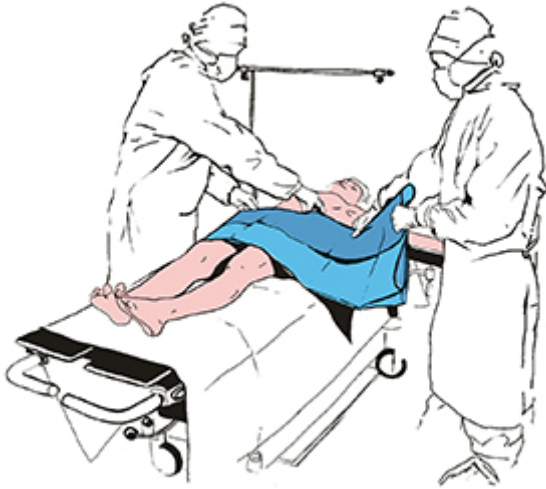


Крепим простыню к телу пациента, обозначая нижнюю границу операционного поля. Оставшейся частью простыни закрываем ноги.

5

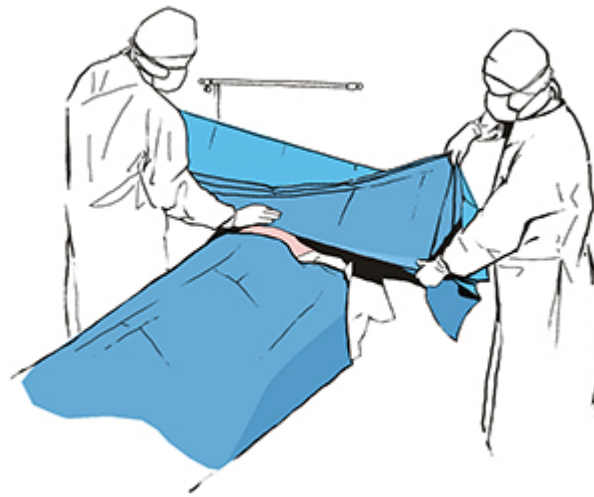

Верхнюю границу операционного поля ограждаем следующим способом: приклеиваем простыню со стороны головы. После этого разворачиваем простыню и крепим к анестезиологическому экрану.

6

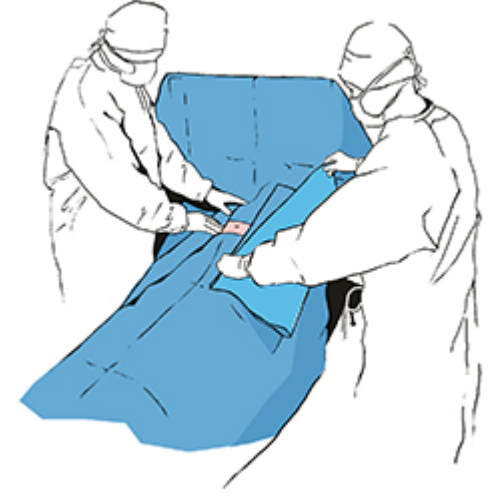

Крепим боковые простыни, обозначая границы операционного поля.