



1

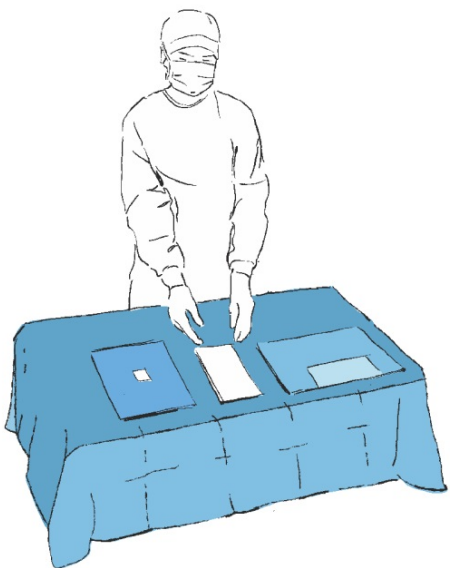

Вскрываем внешнюю упаковку, соблюдая принципы асептики, и размещаем комплект на столе для инструментов. Раскладываем внешнюю простыню на столе для инструментов, а на ней – отдельные элементы комплекта.

2

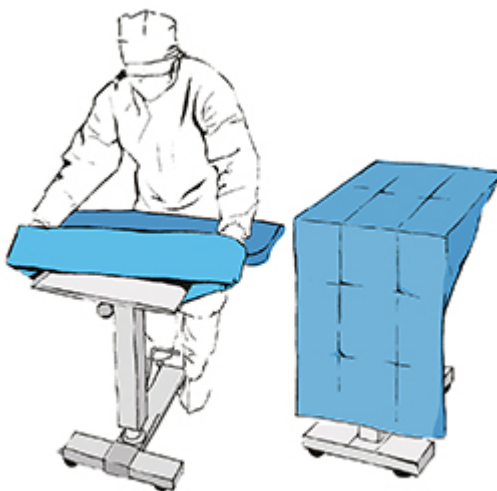

Натягиваем чехол на столик Мейо.


3



Прежде чем разложить простыню на пациенте (обозначить операционное поле), следует обратить внимание на символы, находящиеся на простыне.

Раскладывание набора для кисти и стопы Matodrape

4

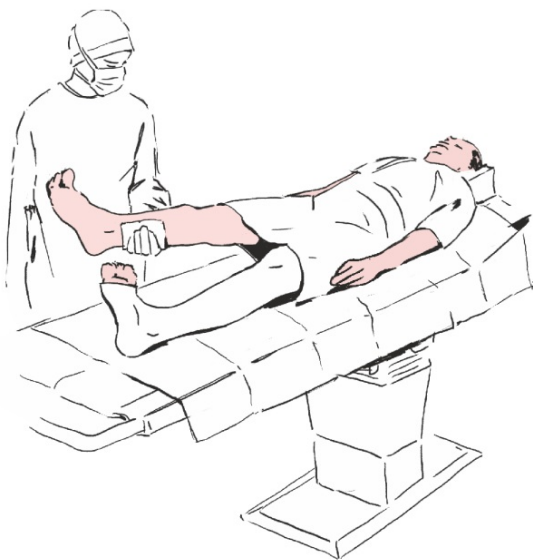


Подносим вверх верхнюю конечность пациента, используя для этого салфетки.

5



Продвигаем верхнюю конечность пациента сквозь отверстие с эластичным элементом в простыне.


6

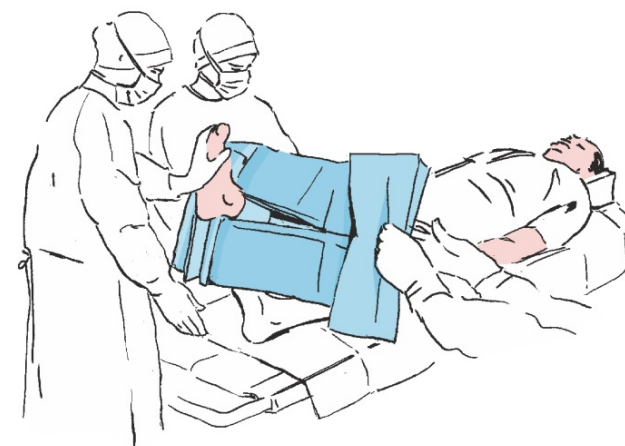

»

Раскладывание набора для кисти и стопы Matodrape

7

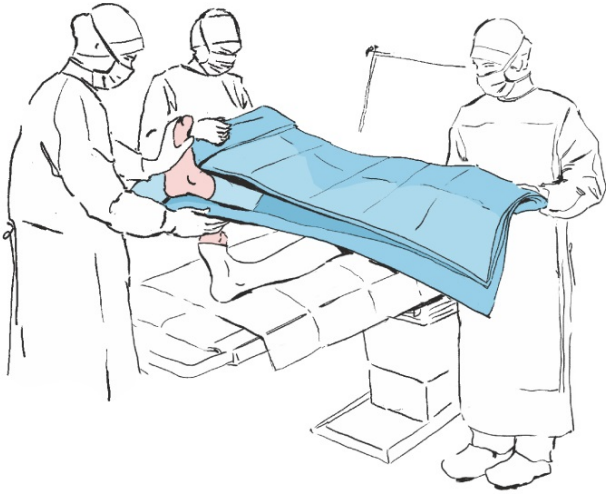

Разворачиваем бока простыни таким образом, чтобы они свободно свисали с операционного стола. Затем разворачиваем верхнюю часть простыни в направлении головы пациента (в направлении анестезиологического экрана). Перекидываем простыню через рамку, создавая таким образом анестезиологический экран.

8



Разворачиваем нижнюю часть простыни в направлении нижнего конца операционного стола, обеспечивая защиту нижних конечностей пациента.

9

