



1

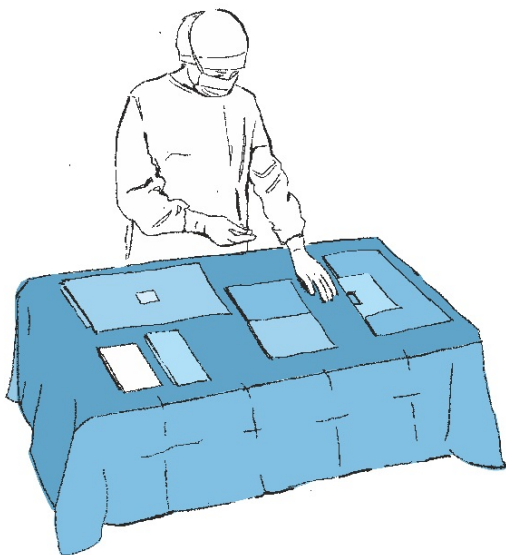


Вскройте бумажно-пленочный пакет в соответствии с принципами асептики и поместите набор на стол для инструментов. Разверните простынь и разложите на нее элементы набора.

2

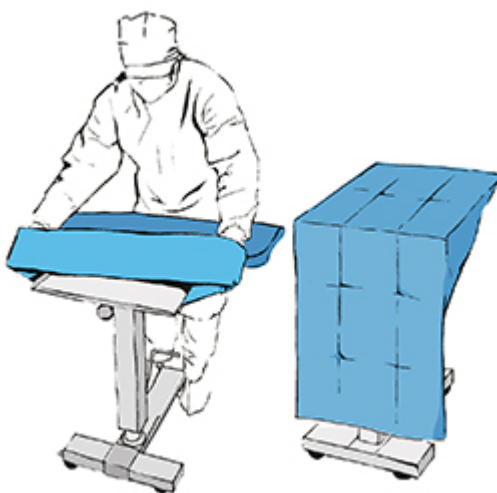

Возьмите чехол и накройте им столик Мейо


3

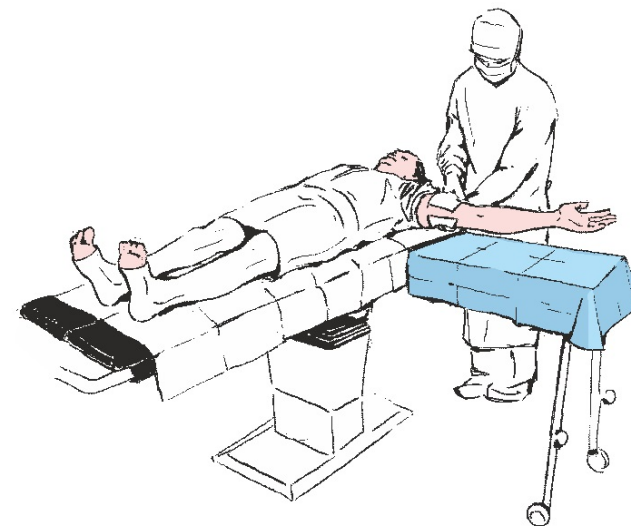

Поднимите верхнюю конечность, подлежащую лечебной процедуре, с помощью полотенец, входящих в комплект.


Инструкция разложения комплекта для операции на верхних конечностях

4

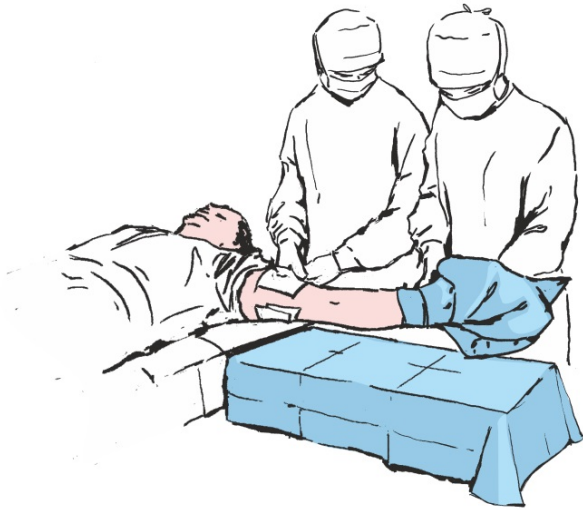

Наденьте чехол на верхнюю конечность пациента.

5

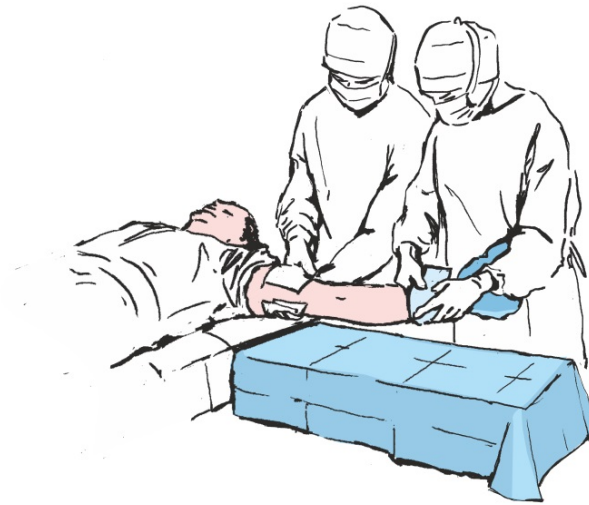

Закрепите чехол на уровне предплечья пациента с помощью прилагаемых фиксирующих лент.


6



Прежде чем приступить к накрытию пациента (определение операционного поля), обратите внимание на направление сложения простыни (указано пиктограммами на драпировке).


Инструкция разложения комплекта для операции на верхних конечностях

7

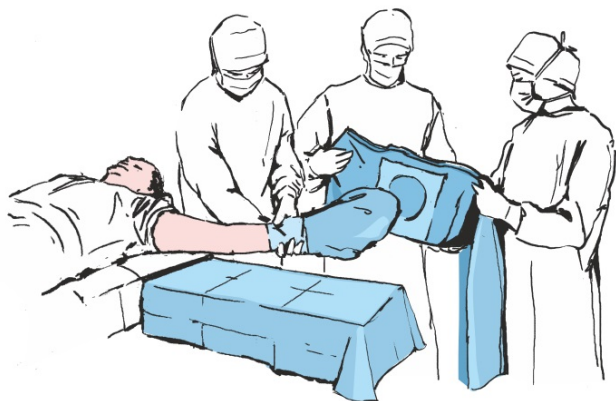


Проденьте верхнюю конечность пациента через эластичное отверстие в основной простыне.

8

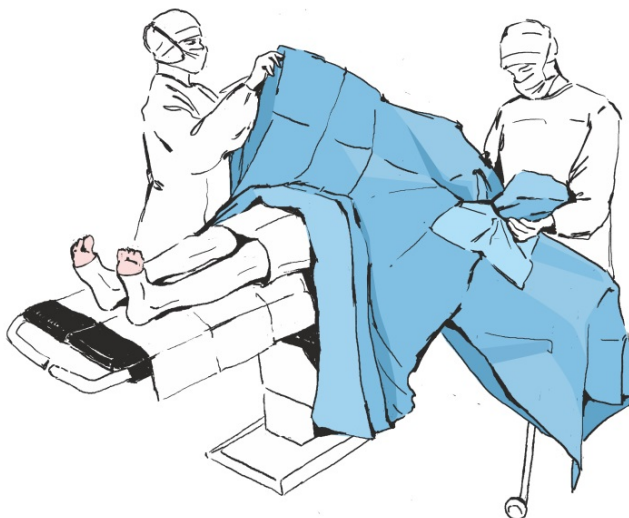

Накройте стойку для конечностей боковой простыней, которая прикреплена к основной простыне.

9

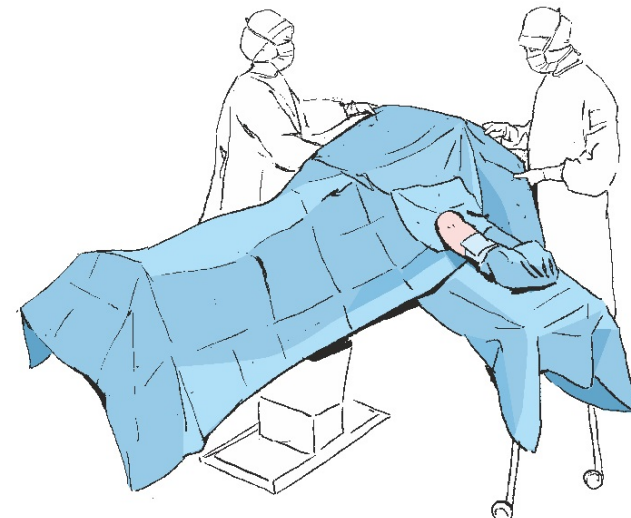

Разверните нижнюю часть простыни по направлению к нижнему краю операционного стола, защищая нижние конечности пациента, а затем разверните простынь в направлении анестезиологического экрана. Оберните ткань вокруг рамы, чтобы создать анестезиологический экран.

Инструкция разложения комплекта для операции на верхних конечностях

10

