


ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ – ПУПОЧНЫЙ ЗАЖИМ

ВНИМАНИЕ!

Неправильное размещение зажима на пуповину может привести к недостаточному закрытию, и в последствии к потере крови, что для некоторых детей может привести к смертельному исходу. Перед использованием изделия прочитайте инструкцию.

1. Перед использованием всегда следует проконтролировать систему блокировки. Не использовать, если система не полная или заблокирована.
2. Проверить толщину пуповины. Если пуповины тонкая может возникнуть необходимость ее сложения перед использованием зажима для создания большего сопротивления при зажатии зажима.
3. Разместить пуповину в середине корпуса зажима.
4. Убедиться, что ни один предмет не блокирует этого места (например салфетки, хирургические инструменты и т.д.).
5. Зажать зажим до блокировки и защёлкивания. Убедиться, что зажим надлежащим образом зажат и нет возможность вскрыть его ладонями. Перерезать пуповину согласно с обязующими стандартами на расстоянии препятствующим соскальзыванию зажима.
6. Удостовериться, что конец пуповины не кровоточит.
7. Регулярно проверять не появилось ли симптомов кровотечения по причине негерметического зажима или повреждённой пуповины.
8. Изделие предназначено исключительно для одноразового использования.
9. Для использования квалифицированным медицинским персоналом.

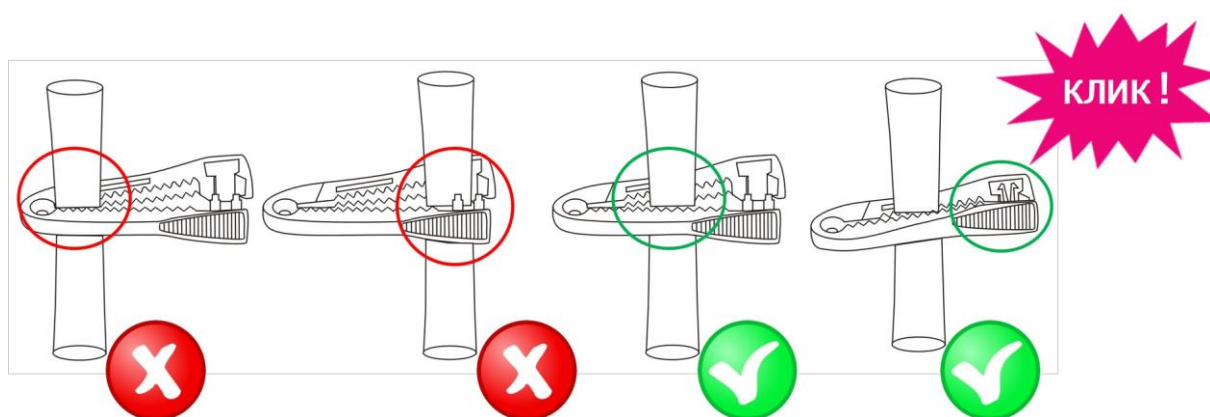

ПРАВИЛЬНО ЗАКРЫТ ЗАЖИМ

