

Инструкция по применению медицинского изделия

Операционное бельё, защитные элементы и аксессуары операционных полей, одноразовые в отдельных упаковках нестерильные Matodrape под товарным знаком matopar: фиксирующие ленты. (размер и кол-во шт. см. на упаковке).

Производитель: «ТЗМО С.А.», Польша, TZMO S.A. (TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH S.A.), Polska, 87-100 Toruń, ul. Żółkiewskiego, 20/26.

Адрес/место производства: Polska, 87-100 Toruń, ul. Żółkiewskiego, 20/26.

Описание: фиксирующая лента- «липучка» состоит из двух частей с самоклеящейся нижней поверхностью. Ленты имеют покрытие из полиакрилатного клея; удаляются без остатков клея с поверхности кожи и покрывающих материалов. Предназначены для фиксации кабелей различных приборов, трубок, простыней.

Состав: силиконизированная бумага, клей горячего расплава и нетканый материал (полиэфир, вискоза).

Назначение: применяются для специализированных хирургических операций, являются барьером для крови и других процедурных жидкостей.

Противопоказания: истёк допустимый срок хранения изделия, указанный на упаковке, нарушена ее целостность. Возможны аллергические реакции на материалы, из которых изготовлено изделие.

Способ применения: после вскрытия упаковки использовать по назначению.

Хранение: хранить в закрытых сухих помещениях, защищённых от атмосферных осадков и почвенной влаги, с температурой выше 0°C.

Срок годности: 5 лет с момента изготовления.

Утилизация: утилизировать как эпидемиологические опасные отходы.

Рекламации: при возникновении вопросов, проблем или неполадок обращайтесь к уполномоченному представителю производителя в РФ.

Продавец / импортер / уполномоченный представитель производителя в РФ: ООО «БЕЛЛА Восток», 140301, Российская Федерация, Московская область, г. Егорьевск, ул. Промышленная, д. 9, тел.: 8 495 726 55 25.

Символы на упаковке:

	Код партии		Возможность утилизации использованной упаковки (LDPE – полиэтилен низкого давления)
	Использовать до		Производитель, адрес, наименование
	Запрет на повторное применение		Номер по каталогу
	Не допускать воздействия солнечного света		Обратитесь к инструкции по применению
	Беречь от влаги		Не использовать при повреждении упаковки
	Европейское соответствие		Знак «medical device»
	Изделие нестерильно		Знак «Зеленая точка»

Рег.№ ФСЗ 2012/11840 от 22.03.2012 г.

Дата последней верификации: _____