


1



После вскрытия упаковки раскладываем комплект на инструментальном столе. Простыня на инструментальный стол, в которую завернут комплект выполняет функцию защиты инструментального стола, на ней следует разложить элементы комплекта.

2

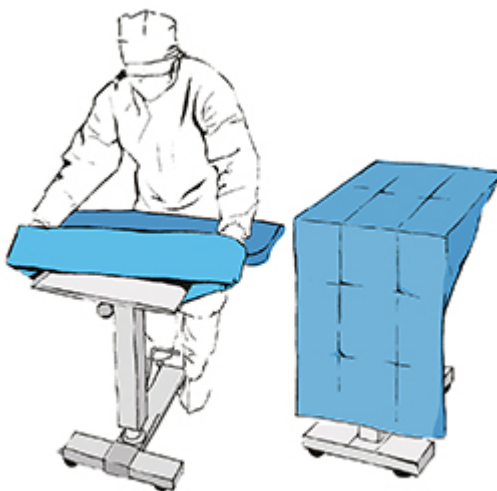

Простыню, в виде чехла с манжетом, натягиваем на столик Мейо.

3




Прежде чем разложить простыню на пациентке (разграничение операционного поля), следует обратить внимание на символы, указывающие в каком направлении следует раскладывать простыню.

Инструкция разложения комплекта для лапароскопии Matodrape

4




5

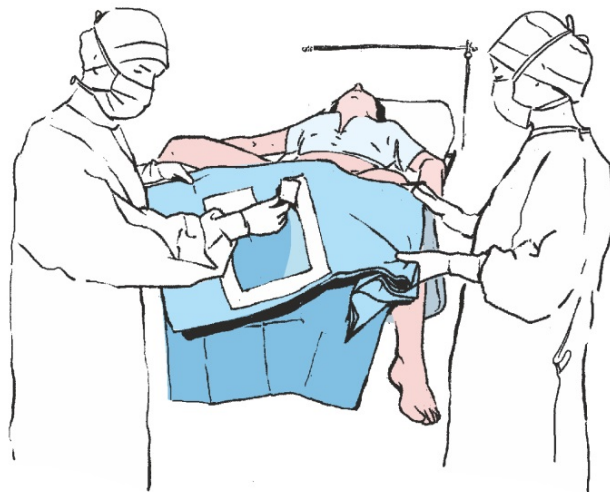

Разворачиваем края простыни на боки. Удаляем защитную бумагу с отверстия в основной простыни.

6

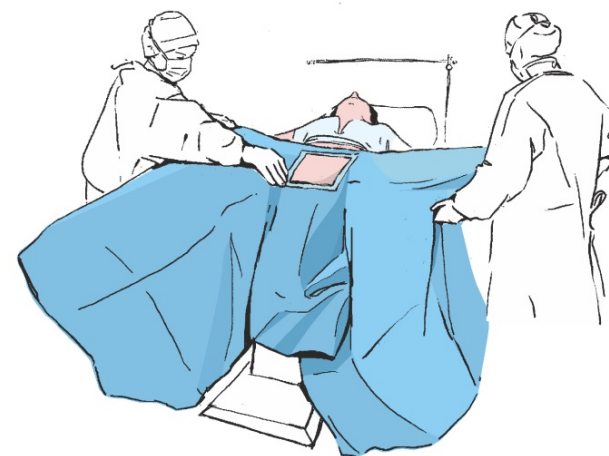

Одеваем интегрированные чехлы на ноги пациента и приклеиваем простыню к животу пациента, обозначая таким образом операционное поле. Следует нажать в области адгезивного края, чтобы крепко приклеить простыню к коже пациента.


Инструкция разложения комплекта для лапароскопии Matodrape

7



Разворачиваем бока простыни таким образом, чтобы они свободно свисали с операционного стола, а верхнюю часть простыни разворачиваем в соответствии с направлением стрелок (в направлении анестезиологического экрана). Перекидываем простыню через рамку, создавая таким образом анестезиологический экран.

8

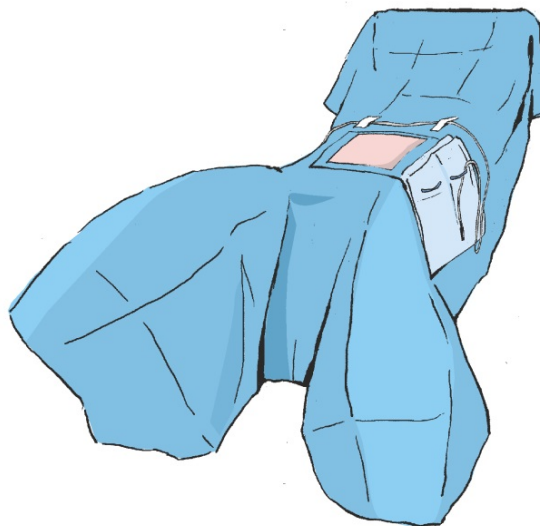

Далее, крепим пленочный карман к простыне, удаляя защитную ленту с клеящего слоя.